


## VERBESSERTE ANTISLIPFOLIEN FÜR SOLITAIRE® PROTECT PLUS

Liebe Kundin, Lieber Kunde,


Ab Anfang August erhalten Sie mit jeder Lieferung von Solitaire® Protect Plus beschichteten Brillengläsern neue Antislipfolien. Wir haben diese Folie umfangreichen Tests unterzogen und frei gegeben. Sie sind eine Weiterentwicklung und zeichnen sich u. a. durch ein verbessertes Handling aus.

Aufgrund der neuen Eigenschaften benötigen Sie zukünftig, anstatt zwei Folien pro Glas nur noch eine Folie.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

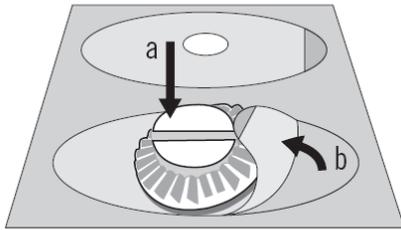

Das Blockstück wird auf die Folie geklebt und mit dieser abgezogen. Die Antislipfolie und das Blockstück werden dann zusammen auf der konvexen Seite des Glases angebracht.

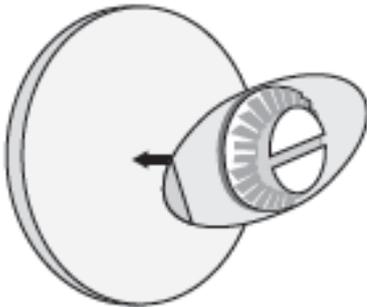

Setzen Sie das Brillenglas in Ihren Formrandungsautomaten ein und bearbeiten Sie dieses wie gewohnt. Nach dem Formranden ziehen Sie die Folie ab. Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen der Antislipfolie, da die Oberfläche leicht beschädigt werden kann.

Zukünftig erhalten Sie zu jedem Solitaire® Protect Plus Auftrag automatisch ein Paar Antislipfolien.