


## NUOVA PELLICOLA ANTI SCIVOLAMENTO PER RODENSTOCK SOLITAIRE® PROTECT PLUS

Gentile Cliente,


A partire dal primo Agosto riceverà la nuova pellicola anti scivolamento per ogni spedizione di lenti con trattamento RODENSTOCK Solitaire® Protect Plus. Questa speciale pellicola è stata sottoposta a test approfonditi, prima di essere lanciata sul mercato e presenta una tecnologia avanzata oltre ad un'estrema maneggevolezza.

Grazie alle innovative caratteristiche di questa pellicola in futuro potrà utilizzarne una sola invece di due.

Seguire le istruzioni come indicato:

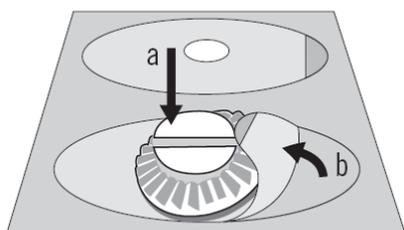

Il supporto di bloccaggio viene incollato alla pellicola tramite il biadesivo e quindi tirando la linguetta reso solidale alla pellicola stessa. La pellicola anti scivolamento e il pezzo di bloccaggio vengono quindi applicati insieme sul lato convesso della lente.

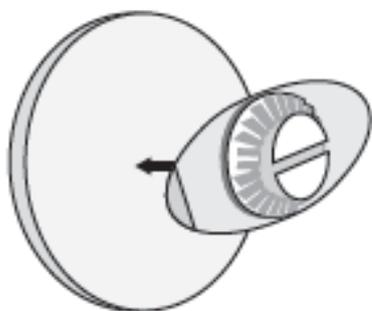

Inserire la lente nella vostra molatrice automatica e trattarla secondo le consuete abitudini. Rimuovere la pellicola dopo la sagomatura. Si prega di non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere la pellicola antiscivolo poiché è molto facile danneggiare la superficie delle lenti.

In futuro, riceverete automaticamente una coppia di pellicole antiscivolamento per ogni ordine di RODENSTOCK Solitaire® Protect Plus.

07/2012